

过敏阻隔剂 说明书

ALLERGY BLOCKER
INSTRUCTIONS



Miho Miele
美和美诺™



Miho Miele
美和美诺™

过敏阻隔剂

Allergy Blocker

【产品名称】过敏阻隔剂

【规格】8g

【产品性能】本品为白色至浅黄色软膏状物，色泽均匀。

【成分】长链碳氢化合物

【适用范围】用于预防和治疗过敏性鼻炎。

【使用说明及图示】本品应平均涂布于鼻前庭部位(如图1)。一天4次(早、中、晚、睡觉前)，每侧鼻腔取长度约为1cm的软膏，然后使用棉签将其均匀涂布于鼻内，大约涂布到外鼻翼的高度。在涂布好本品后，即可用鼻正常呼吸。

每次使用本品前，应清洁鼻腔，去除鼻腔内的附着物。建议用清洁的棉棒清洁鼻腔。

鼻前庭：鼻腔前方鼻翼内面较宽大的部分
(如图1)

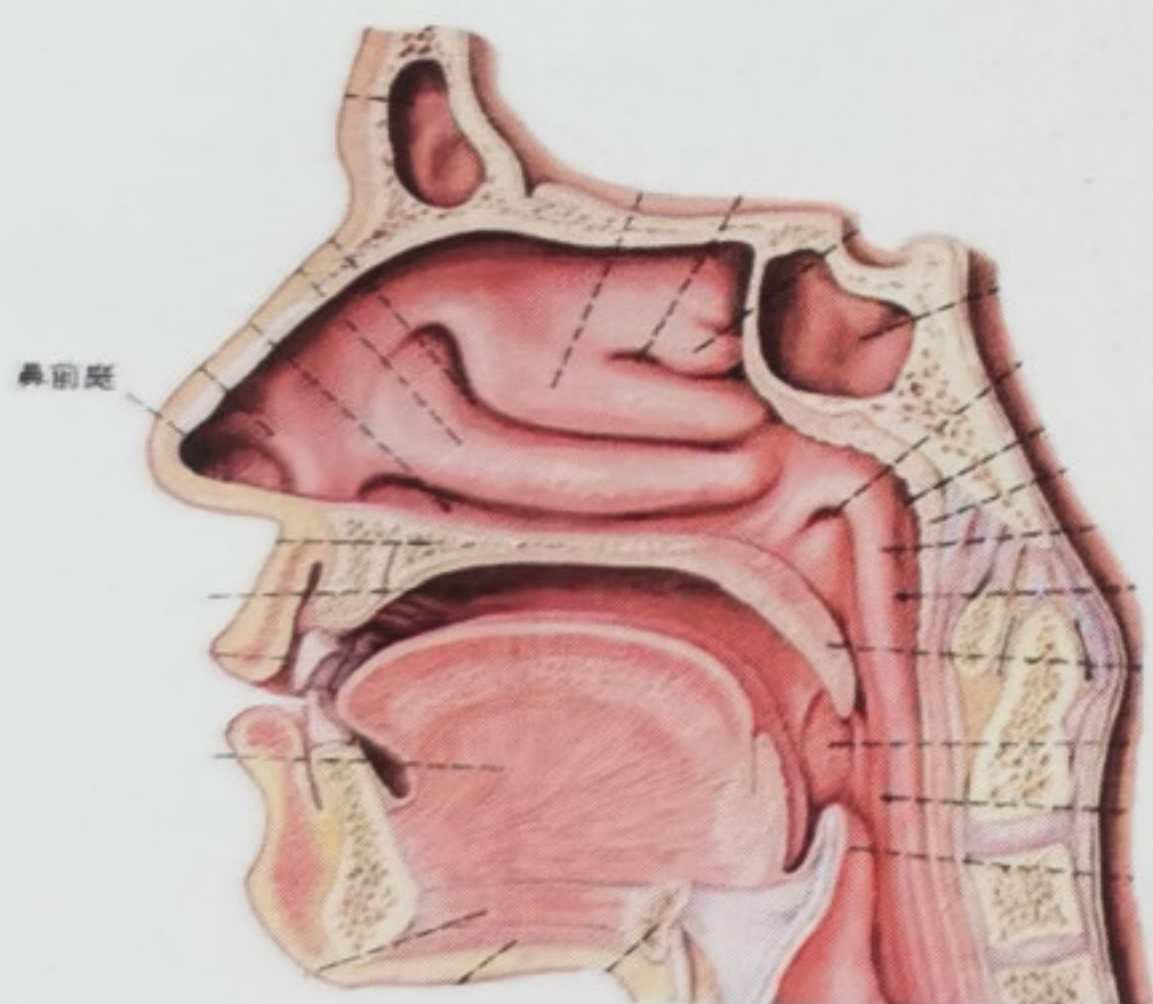


图1

这组图片显示了使用本品之前，过敏粒子(花粉、粉尘、尘螨或动物毛发等)毫无阻碍的吸入的情况(如图2-1)。使用本品后，可以显著减少吸入过敏粒子(如图2-3)。



图2-1

图2-2

图2-3

本品可以使用多长时间并没有限制，使用后请将外盖旋紧，有效期内可重复使用。一般而言，保护层的效果可以持续3至5小时，也可以根据需要缩短涂布间隔期。

【禁忌症】本品不适用于吞咽困难的人使用。

【注意事项】

- 1、均匀涂抹本产品非常重要。
- 2、过量使用并不会提高效率。如果您无意中过量涂抹，您不需要为此担心。鼻和喉的天然清除机制会去除多余的部分。
- 3、请将本品放在儿童接触不到的地方。

【警示及提示】

- 1、在极少数的情况下，本产品可能会引起油性或多汗性皮肤的使用者使用部位变红，但是这种现象不会影响您的健康状况，请以清水冲洗，并停止使用。
- 2、如果您遇到该说明书中并未列出的不良事件或者感觉任何不适，请立即停止使用本品，并向您的医生进行咨询。
- 3、鉴于本品的物理作用机理，目前为止，还没有发现与其他药物的相互作用和对本品所产生的依赖和致敏的报告。因此本品可以和其他治疗方法联合使用。

【产品维护保养】本产品使用后需将外盖旋紧，防止污染。

【储存】密封，在干燥处保存。

【生产日期】见小盒包装。

【使用期限】本品自生产之日起，有效期为三年。当超过包装标明的有效期后，不要使用。

【产品技术要求编号】

湘械注准20152140159

【医疗器械注册证编号】

湘械注准20152140159

【医疗器械生产许可证编号】

湘食药监械生产许20170043号

【说明书编制日期】

2021年6月28日

【生产企业】

名称：湖南美和美诺生物技术有限公司

住所：浏阳经济技术开发区康平路6号

生产地址：浏阳市经开区康平路6号

联系电话：0731-83281728

传真：0731-83280728

【注册人】

名称：湖南美和美诺生物技术有限公司

住所：浏阳经济技术开发区康平路6号

联系电话：0731-83281728

传真：0731-83280728

【售后服务单位】湖南美和美诺生物技术有限公司